

# teamplay

## 有哪些 新功能?

发现最新特性和功能

## 尊敬的 teamplay 用户，

如今，超过 1,000 家机构正在使用 teamplay。在面向每个人的新版软件中，我们提供各种支持服务，便于您更好地执行您的工作，在 teamplay 中找到您想要的所有信息。我们的开发团队一直在努力工作，为即将推出的软件版本做好万全准备。

每位 teamplay 用户都将能够自动使用<sup>1</sup> 基于自身订阅的全新特性和功能。我们想告知您最新的功能和您从新功能中可获得的效益。


## 有什么新功能？

整体上：

- 您可以通过全新的应用启动程序启动所有应用。新屏幕为显示您机构的重要事实和数字留出了更多空间。



- 角色分配功能为机构管理员提供了向用户自由分配角色的可能性。管理员可以根据用户的专业职责为每个独立用户或一次为多个用户创建访问和权限。

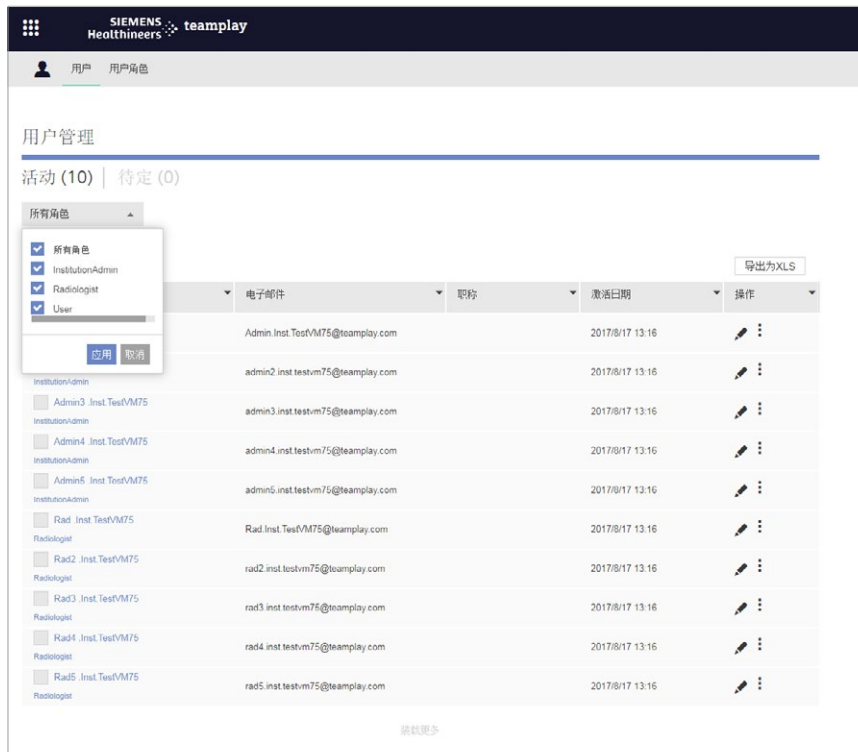

- 检查全新快速指南。它们提供关于 teamplay 应用、配置和设置的更多信息。您可以直接从主屏幕访问快速指南。

## teamplay Dose:


- 全新的剂量参考水平页面让您可以更轻松地按每个检查类型查看所有配置的辐射剂量单位。
- 使用双面造影设备时，您可以在事件区找到平面聚合信息。
- 输入完整患者 ID 来访问与患者相关的检查和剂量信息。




- 将数据导出为 Excel 文件时，关于辐射事件的评论也会自动包含在内。这有助于您按照法规获取关于应用的辐射值的详细信息和相应的评论。

## teamply Use:

- teamply 使用情况的全新设计及其条形图让您立即更轻松找到合适的绩效指标

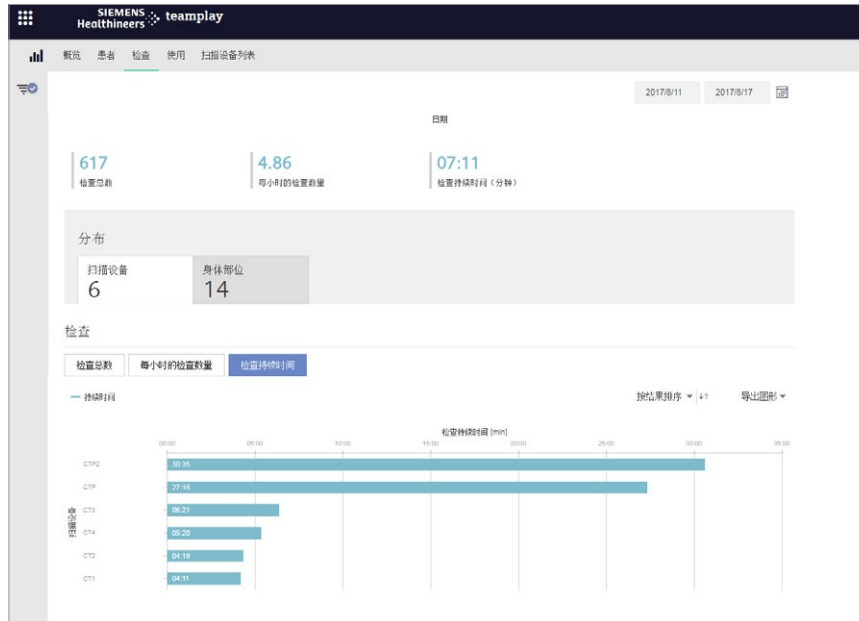


- 两项全新的绩效指标传递了关于您设备的更深入信息。它们显示出利用率和设备占用率，便于您采用相对方式准确了解设备的使用方式。设备占用率代表了患者实际在设备的时间。这会显示设备使用时间与设备可用时间的比例。

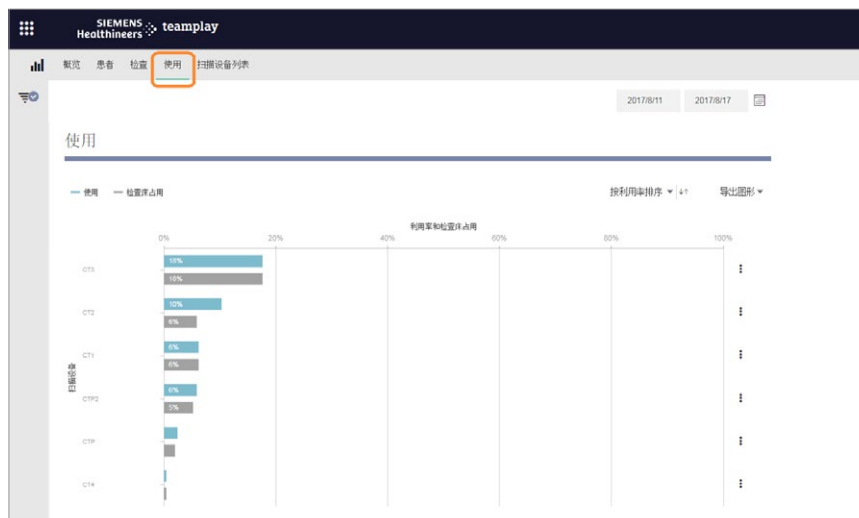

## teamply Images<sup>2</sup>:

发布新的软件版本后，届时将会有两个产品面世。根据您所在国家的法规和您的订阅情况，您将能够使用 **teamply Images Research** 或 **teamply Images**。


- **teamply Images Research** 将会成为现有应用的新名称，并将具备下列新功能：
- 处理图像现在更简单了，因为您可以在不再需要共享图像时撤回该图像。
- 上传至 **teamply Images Research** 中的检查可自动接收分配给该检查的唯一 ID。这让您可以更轻松地识别或搜索特定检查。
- 为了改进针对特定案例的搜索，您现在可以按上传日期对“所有检查”中的检查进行分类。

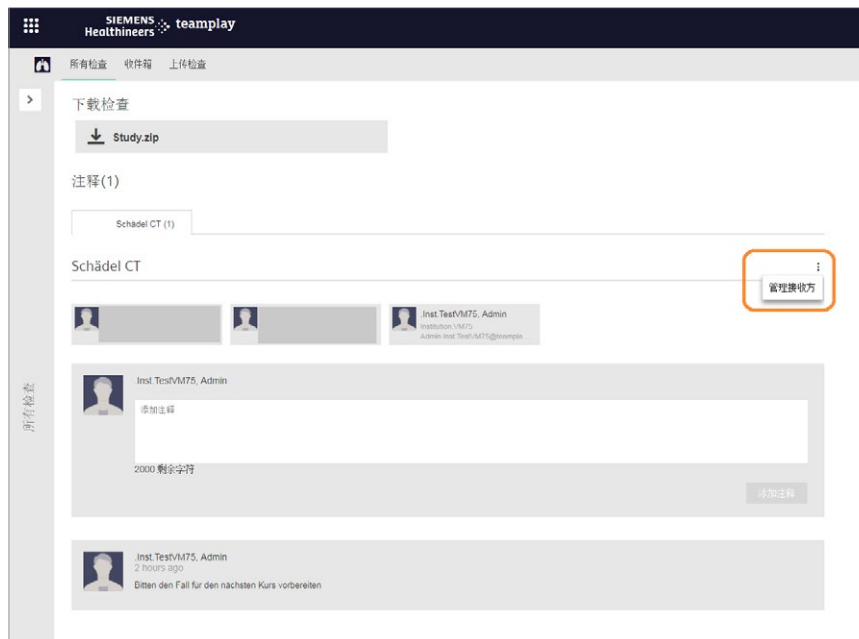

- 除 **teamply Images Research** 外，**teamply Images (VC10A)** 还具备协作功能，能够帮助您增加临床工作流程中的沟通速度，减少周转时间。与其录制一张包含 CT 检查信息的 DVD，您现在可以通过 **teamply Images** 安全、快速地交换本检查数据。

## teampay Protocols<sup>3</sup>:

- 为了更好地验证 CT 扫描方案中的变化，与 teampay Dose 的互动功能支持您更轻松地浏览这些变更。现在您可以在 teampay Protocols 中验证每个扫描方案的应用平均剂量。

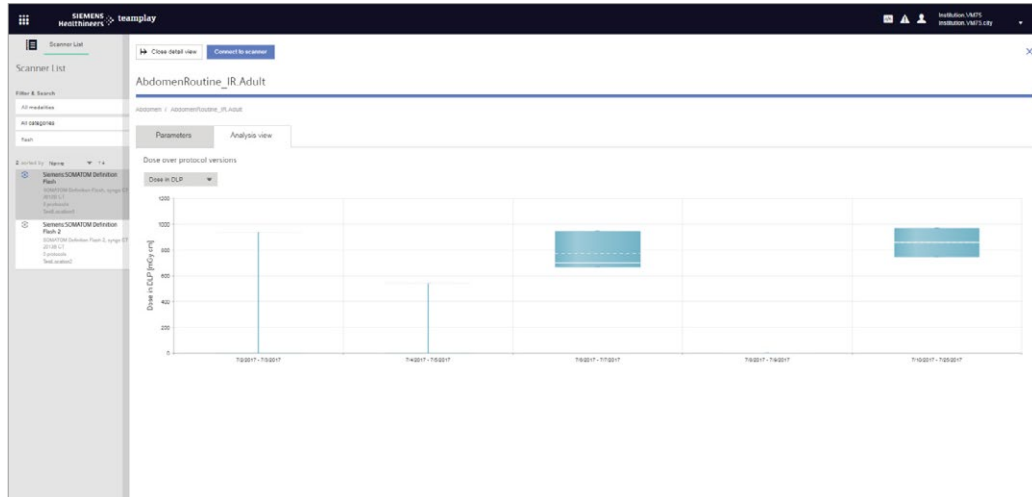

- 通过全新用户角色功能可将访问 teampay Protocols 的权限分配给相应的专家。
- 可将扫描方案列表从每个扫描仪中导出到 Excel 文件中。
- 在不同方案之间进行比较时，可通过突出显示改变的参数来快速定位到差异之处。

<sup>1</sup> 前提条件包括：无线连接临床网络、满足推荐的最低硬件要求和符合当地数据安全法规。

<sup>2</sup> teamplay Images VC10A 并非在所有国家/地区的市场上可售。因法规原因，无法保证它们在未来上市出售。请联系您的当地西门子组织，了解更多详情。

DICOM 查看器并非为显示诊断而设计。

<sup>3</sup> teamplay Protocols 支持选定的西门子扫描仪。请联系您的西门子代表，了解更多详情。

.....  
**Siemens Healthineers Headquarters**  
Siemens Healthcare GmbH  
Henkestr. 127  
91052 Erlangen  
Germany  
电话： +49 9131 84-0  
siemens-healthineers.com